


PREVENA™

INCISION MANAGEMENT SYSTEM



Din läkare har valt
PREVENA™-behandling
FÖR HANTERING AV DIN
KIRURGISKA INCISION

Din läkare har valt PREVENA™-systemet för att skydda din incision därför att det:

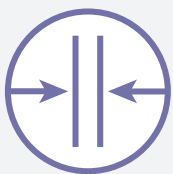

Bidrar till att hålla ihop incisionskanter



Ger skydd mot yttre infektionskällor




Avlägsnar vätska från incisionsstället

Det är viktigt att du skyddar din incision för att kunna återhämta dig

- En **incision** är ett snitt genom kroppens hud och vävnad som görs under kirurgi och sedan försluts med produkter som kirurgiska stygn, klamrar eller en kombination av dessa metoder.
- Incisioner läker vid hudens yta såväl som under ytan.
- Det är viktigt att du tar hand om din incision, eftersom det kan påverka både din återhämtningstid och din livskvalitet.

PREVENA™-behandling

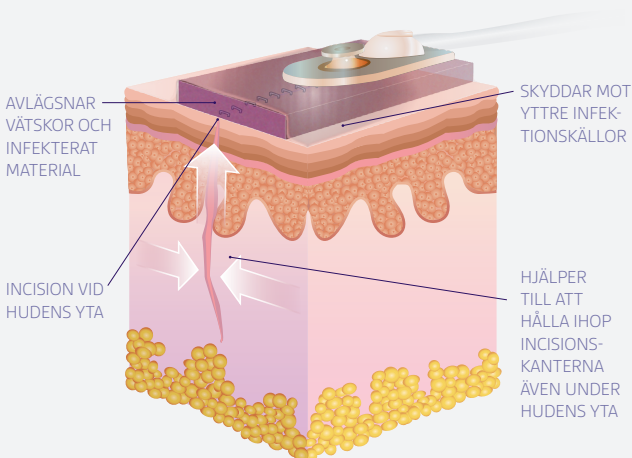

VANLIGA FRÅGOR

Hur länge ska jag ha PREVENA™-behandlingen på min incision?

- Bär systemet så länge som din läkare har fastställt. Behandlingsenheten stängs av automatiskt efter 7 dagar.

Behöver mitt incisionsförband bytas ut?

- Förbandet byts i regel inte ut. Följ din läkares anvisningar.

Vad händer om mitt PREVENA™-system larmar?


- Behandlingsenheten har larm som du kan se och höra för att varna dig om ett potentiellt problem som till exempel ett svagt batteri eller luftläckage. I de flesta fall kan problemet enkelt åtgärdas. Se patienthandboken för PREVENA™-behandlingen eller kontakta närmaste Acelity-representant.

Var kan jag få mer information?

- Patienthandboken för PREVENA™-behandlingen har mer komplett säkerhetsinformation och mer information om hur du använder PREVENA™-behandlingen.

Så här bär du PREVENA™ - behandlingsenheten

Den här bärbara enheten ska **alltid** vara påslagen så länge som läkaren har angett. Följ anvisningarna för sömn och dusch som anges i den här broschyren. Enheten kan bäras under kläderna och inkluderar en bärväska med justerbara remmar som du kan använda på flera sätt.

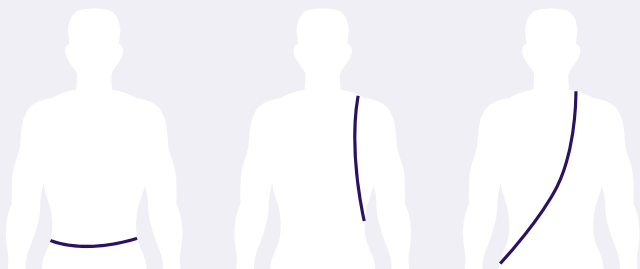

På höften

Över axeln

Tvärsöver
kroppen



BEHANDLINGS-
ENHETEN
PREVENA™ 125
OCH BÄRVÄSKA

OBS! PREVENA™-systemet är inte indicerat för användning på barn.

VAD ÄR PREVENA™ - BEHANDLING?

PREVENA™-behandling är ett bärbart system för engångsbruk som använder **negativt tryck** (vakuum) för att skydda din incision.

Ditt PREVENA™-system

Efter kirurgi kommer du att föras med PREVENA™ PEEL & PLACE™-systemet eller PREVENA PLUS™-systemet. Båda PREVENA™-systemen fungerar på liknande sätt med endast några få skillnader.

Ditt system inkluderar:

- en behandlingsenhet som tillhandahåller negativt tryck till förbandet
- ett förband med ett vattenbeständigt skydd som är placerat över din incision
- en anslutnings slang
- en behållare där incisionsvätska samlas upp
- en batteriladdare (behandlingsenheten PREVENA PLUS™ har ett laddningsbart batteri)
- en bärväska med justerbara remmar



OBS! PREVENA™-systemet kan användas på olika incisionstyper. Din incisions storlek och placering kan skilja sig från de som visas på bilden ovan.

SÅ HÄR TAR DU HAND OM DIN PREVENA PLUS™

Behandlingsenheten PREVENA PLUS™ 125

System:

Förvara behandlingsenheten på en säker plats där:

- slangen inte viks eller kläms
- enheten inte kan dras ner från ett bord eller ramla på golvet



Dusch:

En snabb och lätt dusch är tillåtet om din läkare godkänner det. Håll behandlingsenheten på avstånd från direkta duschstrålar. **Doppa inte förbandet i vatten. Koppla loss förbandet från behandlingsenheten innan du duschar.**

1. Håll inne PÅ/AV-knappen tills behandlingen avbryts
2. Stäng klämman på anslutningsslangen
3. Koppla bort slangen från behandlingsenheten
 - Var försiktig så att du inte rubbar förbandet vid torkning med handduk.

Se patienthandboken för PREVENA PLUS™-behandlingen för ytterligare information.

Batterier:

- Den här behandlingsenheten har ett laddningsbart batteri och levereras med en laddare.
- Ta med dig laddaren om du är borta en längre tid.
- För enkelhets skull kan du överväga att ladda behandlingsenhetens batteri medan du sover.

PREVENA™-BEHANDLINGSENHET

Behandlingsenheten PREVENA™ 125

System:

Förvara behandlingsenheten på en säker plats där:

- slangen inte viks eller kläms
- enheten inte kan dras ner från ett bord eller ramla på golvet



Dusch:

En snabb och lätt dusch är tillåtet om din läkare godkänner det. Håll behandlingsenheten på avstånd från direkta duschstrålar. **Doppa inte förbandet i vatten.**

- Var försiktig så att du inte rubbar förbandet vid torkning med handduk.

Se patienthandboken för PREVENA™-behandlingen för ytterligare information.

Batterier:

- Den här behandlingsenheten levereras med tre batterier av AA-storlek som inte kan laddas upp.
- Du rekommenderas att ha extra batterier till hands. I patienthandboken för PREVENA™-behandlingen finns det anvisningar om hur du byter ut batterierna om de laddas ur.

PREVENA™-behandlingsförbandet

Försök inte ta bort eller titta in under förbandet när behandlingen pågår.

Det är viktigt att du diskuterar potentiella fördelar och risker med varje specifik behandling tillsammans med din läkare för att bestämma om behandlingen är den rätta för dig. Vänd dig till behandlande medicinsk personal för specifika frågor och viktig information relaterad till användning, säkerhetsinformation och drift av PREVENA™-systemet.

OBS! Särskilda indikationer, kontraindikationer, varningar, försiktighetsåtgärder och säkerhetsinformation finns tillgängliga för PREVENA™-behandlingen. Se tillämpliga bruksanvisningar i den kliniska guiden för PREVENA™-systemet innan användning.

Upphovsrätt 2019 KCI Licensing, Inc. Med ensamrätt. Alla varumärken som anges här tillhör KCI Licensing, Inc., dess dotterbolag och/eller licensgivare.
PRA-PM-SE-00014 (01/19)